

nitolic® | MOD DE UTILIZARE

NITOLIC® cu pieptăn pentru îndepărtarea păduchilor de cap – dispozitiv medical pentru tratamentul infestării cu păduchi de cap (*Pediculus humanus capitis*).



CUM FUNCȚIONEAZĂ:

- ucide păduchii de cap în toate etapele de dezvoltare ale acestora.
- ucide ouăle de păduchi
- facilitează procesul de înlăturare a păduchilor și a lindinilor prin pieptănare



Citiți întotdeauna instrucțiunile înainte de utilizare. Pentru un tratament eficient, urmați instrucțiunile de mai jos:

- Păstrați aceste instrucțiuni pentru utilizările ulterioare.
- Folosiți acest produs numai conform instrucțiunilor.
- Dacă aveți întrebări, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- În caz de reacții adverse, întrerupeți utilizarea și adresați-vă medicului.



INFORMAȚII UTILE cu privire la păduchii de cap (*Pediculus humanus capitis*) și dispozitivul medical NITOLIC®.

Păduchele de cap este o insectă mică (2,0-4,7 mm), fără aripi, cu un profil plat. Păduchii de cap au culori variate, de la alb-galbui până la maro închis și tind să se potrivească culorii de păr a gazdei. Păduchii se hrănesc cu sânge uman de mai multe ori pe zi și trăiesc în apropierea scalpului uman. Se deplasează agățându-se de păr cu trei perechi de picioare înzestrate cu cârlige. Păduchele adult respiră prin 7 perechi de spiracle situate pe torace și abdomen.



NITOLIC® se distribuie rapid și uniform pe scalp, acoperind complet păduchii (tehnologia o-effect®). NITOLIC® umple spiraclele păduchilor, asigurând astfel eliminarea rapidă a acestora.




o-effect®
technology

Eficacitate 100% în toate etapele de dezvoltare a păduchilor de cap și a ouălor.

Caracteristica cheie a acestui dispozitiv medical, destinat tratamentului împotriva păduchilor de cap, este răspândirea lui rapidă și uniformă pe scalp și păr datorită tehnologiei o-effect®.

CICLUL DE VIAȚĂ AL PĂDUCHELUI

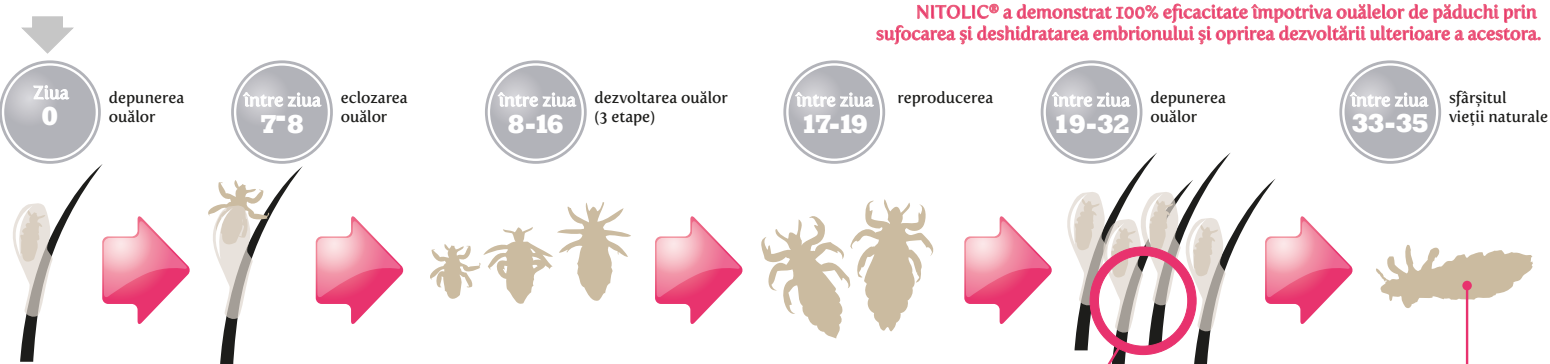

REZISTENȚA PĂDUCHILOR ȘI DISPOZITIVUL MEDICAL NITOLIC®

Păduchii de cap au dezvoltat rezistență la insecticidele tradiționale care acționează prin perturbarea proceselor fiziologice, ceea ce duce la eșecul tratamentului. Blocajul mecanic al aparatului respirator al păduchelui, conceptul pe care se bazează NITOLIC®, elimină șansele ca păduchii să devină rezistenți la acest tratament specific.



O femelă depune ouăle la baza firului de păr, lângă scalp, agățându-le foarte bine de firul de păr.

Ciclul de viață al păduchelui este de cca. 40 zile, deși acesta nu poate supraviețui departe de capul uman mai mult de 24-48 de ore.



Pieptenele NITOLIC® ajută la îndepărtarea păduchilor și a ouălor acestora (lindini) după tratament.



MOD DE UTILIZARE

SFATURI IMPORTANTE

Pentru a asigura eliminarea completă și a evita reinfestarea, tratamentul trebuie să fie administrat în același timp tuturor membrilor familiei care ar putea fi infestați. Tratamentul împotriva păduchilor trebuie efectuat în condiții de iluminare foarte bună. Este important să aplicați tratamentul de la baza spre vârful firelor de păr. Pentru un tratament eficient aplicați NITOLIC® pe toată suprafața scalpului și părului. Aplicați mai întâi în spatele urechilor, pe ceafă, în jurul gâtului și în jurul liniei părului.



1 Dacă aveți părul lung, împărțiți părul în patru secțiuni: din față în spate și de la o ureche la cealaltă.



2 Aplicați NITOLIC® pe păr uscat pe întreaga suprafață a scalpului și a părului, pornind de la baza spre vârful părului. Aplicați mai întâi în spatele urechilor, pe ceafă și în jurul liniei părului.



3 Aplicați o cantitate suficientă de NITOLIC® pe păr și scalp pentru a vă asigura că toți păduchii și lăinile sunt complet acoperite.



4 După tratament, acoperiți capul timp de **o oră** cu o cască de baie. **ATENȚIE!** Vă rugăm să respectați toate recomandările și timpul de expunere cu strictețe.



5 Scoateți casca de baie și spălați-vă pe păr cu apă și șampon.



6 Îndepărtați păduchii și lăinile din păr folosind NITOLIC® pieptăn pentru îndepărtarea păduchilor.

SFATURI PRIVIND PIEPTĂNAREA



Împărțiți părul lung în secțiuni și fixați fiecare șuviță. Ridicați o șuviță mică de păr dintr-o secțiune mai mare pentru a face scalpul vizibil. Pieptănați cu atenție șuvița, trăgând NITOLIC® pieptăn pentru îndepărtarea păduchilor cu fermitate, de la baza spre vârful părului. Fixați șuvița pieptănată la spate. Ștergeți ouăle și lăinile de pe NITOLIC® pieptăn pentru îndepărtarea păduchilor cu un șervețel.



Dacă aveți întrebări suplimentare, adresați-vă medicului sau farmacistului.



INFORMAȚII IMPORTANTE

- NITOLIC® a dovedit că doar o singură utilizare a acestui dispozitiv asigură 100% eficacitate în toate etapele dezvoltării păduchilor de cap, inclusiv a lăinilor, fără repetarea tratamentului.
- Cel mai des infestarea cu păduchi are loc ca rezultat al contactului cu persoanele deja infestate, astfel reinfestarea poate avea loc, de exemplu, la creșă sau la școală. Așadar, este important să se inspecteze părul de păduchi, cu atenție și în mod regulat, cel puțin odată pe săptămână.
- NITOLIC® cu pieptăn pentru îndepărtarea păduchilor este un dispozitiv medical cu utilizare multiplă. Spre deosebire de alte produse împotriva păduchilor de cap, datorită modului specific de acțiune, acest produs elimină posibilitatea ca păduchii de cap să devină rezistenți la tratament.
- Tratamentul cu NITOLIC® duce la deshidratarea ouălor de păduchi (lăini), ce duce la producerea unui sunet "click" în momentul strivirii acestora. Pieptănați ouăle de păduchi (lăini) după tratament.
- Pentru mai multe informații cu privire la NITOLIC® cu pieptăn pentru îndepărtarea păduchilor, vă rugăm să vizitați www.nitolic.com



INFORMAȚII PRIVIND MODUL DE UTILIZARE

ATENȚIONĂRI

Folosiți numai conform instrucțiunilor, urmați îndrumările din aceste instrucțiuni.

Evitați pătrunderea produsului NITOLIC® în ochi, gură, nas sau gât. În caz de contact cu ochii, clătiți ochii cu multă apă timp de 10-15 minute. Dacă iritația persistă, consultați medicul sau farmacistul.

NITOLIC® sistem este destinat exclusiv pentru uz extern. Nu aplicați pe piele tăiată, răni sau piele iritată.

Înainte de a utiliza NITOLIC®, aplicați o cantitate mică de NITOLIC® pe palmă pentru a verifica orice reacții adverse.

Utilizarea tratamentului la copii se face numai sub directă supraveghere a unui adult.

Podeaua va deveni alunecoasă la contactul cu acest dispozitiv medical. Ștergeți urmele produsului de pe podea imediat.

Acest dispozitiv medical poate reacționa cu anumite produse pentru îngrijirea și vopsirea părului.

CONTRAINDICAȚII

Nu utilizați dacă sunteți alergic la oricare dintre ingredientele NITOLIC®.

Nu aplicați NITOLIC® pe tăieturi, răni sau piele iritată.

Nu utilizați NITOLIC® după data de expirare indicată pe ambalaj.

A nu se utiliza la copii cu vârsta sub 2 ani.

EFECTE ADVERSE POSIBILE

Următoarele efecte adverse pot să apară: iritație, roșeață și umflarea pielii. În situația puțin probabilă ca aceste simptome să apară, încetați imediat utilizarea NITOLIC® și contactați medicul dumneavoastră.



DETALII DESPRE ACEST DISPOZITIV MEDICAL

PĂSTRARE:
Păstrați produsul NITOLIC® într-un loc uscat, întunecat, la temperaturi între 5°C-40°C. Ambalajul gol este reciclabil.

CONȚINUT:
cicloticonă, polisorbit 80, miristat de izopropil

Dimensiunile de ambalaj disponibile*:
20 ml, 25 l, 30 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml

*Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi disponibile pe anumite piețe.

PRODUCĂTOR:
ICB PHARMA
Tomasz Świętosławski,
Paweł Świętosławski
Spółka Jawna
6a Moździerzowców St.
43-602 Jaworzno
Polonia

DISTRIBUITOR ROMÂNIA:
S.C. TOP-PHARMA MARKETING S.R.L.
București, str. Calea Șerban Vodă 54,
bl. A, et. I, ap. 2, Sector 4,
Tel: 0314 379 905; www.toppharm.md

REPREZENTANT AUTORIZAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA:
S.C. "TOP-FARM" S.R.L.
Chișinău, str. A. Bernardazzi 78
Tel: 022 241 126; www.toppharm.md



NE INTERESEAZĂ SATISFAȚIA DUMNEAVOASTRĂ CU ACEST PRODUS. AȘTEPTĂM PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ LA:

@ info@icbpharma.pl



VEZI ETICHETA

Data emiterii instrucțiunilor: IFU/PNG/04.2015
© 2015 Toate drepturile rezervate. NITOLIC® este o marcă înregistrată de ICB PHARMA